

## SÅDAN FÅR DU SVAR

Vi sender dig en email eller sms, når svaret på din test er klar. Her modtager du en personlig kode, som du kan bruge til at finde dit svar på [www.klamydiahjemmetest.dk](http://www.klamydiahjemmetest.dk).

Vi kontakter dig kun, når dit testsvar er klar.

# HJEMMETEST

VEJLEDNING TIL URINTEST FOR KLAMYDIA OG GONORÉ

## SÅDAN SENDER DU TESTEN



### TRIN 5

Send kuverten som post samme dag som prøven er taget, men det er vigtigt du kun sender den mandag til onsdag, så prøven ikke forældes.

Du kan ikke sende kuverten med prøven via en rød postkasse. Send den på posthus via PostNord.

Find dit nærmeste posthus på [www.postnord.dk](http://www.postnord.dk)



### VIGTIGT

- ▶ Testen virker først to uger efter, du har haft ubeskyttet sex. Vent derfor til de to uger er gået, inden du tager testen.
- ▶ Testen har en begrænset holdbarhed på cirka tre måneder. Tag den derfor hurtigst muligt.
- ▶ Gå til lægen, hvis du er bekymret for, at du kan være smittet med andre sexsygdomme end klamydia/gonorré.

SEX  
SAMFUND


# SÅDAN TAGER DU TESTEN



## TRIN 1

Du skal tisse i et bæger/kop – brug morgenurin eller vent med at tisse i koppen til efter to timer siden din sidste vandladning.

Brug den vedlagte pipette til at suge urinen op. Du skal bruge mellem 10-50 ml.

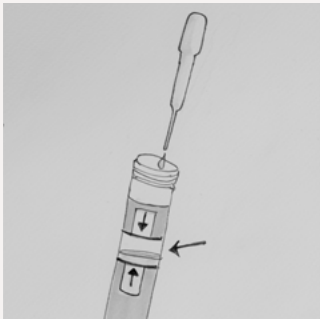


## TRIN 2

Skru låget af det lille vedlagte glas, og hæld ikke væsken i glasset ud. Hæld derefter urinen fra pipetten ned i glasset.

Fyld kun op til den øverste sorte streg. Skru låget godt fast.

# SÅDAN PAKKER DU TESTEN

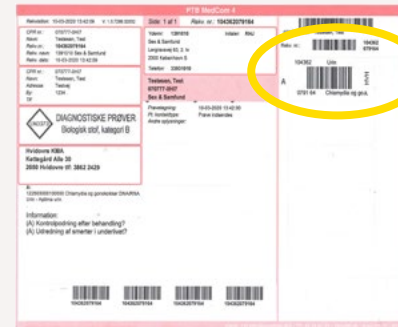

## TRIN 3

Tag klistermærket med strejkode af fra den vedlagte prøveseddel. Det sidder i øverste højre hjørne af sedlen.

Placér klistermærket lodret på prøveglasset.



## TRIN 4

Læg prøveglasset med urinen og prøvesedlen ned i den hvide kuvert.

Se bagsiden for at læse, hvordan du sender kuverten.